


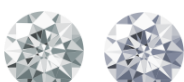

Glaze-On Color Set, akrilik tabanlı malzemelerin laboratuvar uygulamalarında karakterizasyonu ve estetik renklendirilmesi için tasarlanmıştır.

- Diş ve diş eti için kullanılabilen 15 renk
- 2 adet bitiş glazürü
- 2 adet uygulama fırçası
- 2 adet karıştırma paleti
- 1 adet pratik ve dayanıklı taşıma çantası

GLZ-A015	RUTILITE A		GLZ-PI015	RHODONITE PINK	
GLZ-B015	RUTILITE B		GLZ-LV015	AMETHYST LAVENDER	
GLZ-C015	RUTILITE C		GLZ-BL015	OPAL BLUE	
GLZ-YE015	AMBER YELLOW		GLZ-OL015	EMERALD GREEN	
GLZ-OR015	CALCITE ORANGE		GLZ-GR015	HEMATITE GREY	
GLZ-PO015	AGATE ORANGE		GLZ-WH015	WHITE	
GLZ-RE015	RUBY RED		GLZ-IV015	IVORY	
GLZ-RB015	JASPER RED BROWN		GLZ-CL015/ GLZ- GL015	CLEAR / DIAMOND CLEAR	

Endikasyonlar

1. Direkt ve indirekt kompozit restorasyonların, akrilik protez kaidelerinin ve akrilik yapay dişlerin karakterizasyonunda kullanılır.
2. Kompozit rezin, akrilik protez kaidesi ve akrilik yapay dişlerden üretilen restorasyonlarda yüzey pürüzsüzlüğü ve aşınma direnci sağlamak amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyon

Akrilat / metakrilat monomerlerine veya akrilat / metakrilat polimerlerine karşı bilinen alerjisi bulunan hastalarda bu ürünün kullanımı kaçınılmalıdır.

Saklama Koşulları

Ürünün optimum performansını koruyabilmesi için **4–25 °C** aralığındaki oda sıcaklığında saklanması tavsiye edilir.


Aşağıdaki adımlar izlenerek uygulandığında istenilen sonuçlar elde edilecektir:

1. YÜZEY HAZIRLIĞI

(Aşama 1 – Yüzey Hazırlığı)

Protez yüzeyi, glaze uygulamasına uygun hale getirilmelidir.

- Buhar veya ultrasonik temizleme uygulanır.
- Yüzey üzerinde yağ, toz, polisaj pastası veya monomer kalıntısı kalmamalıdır.
- Uygulama öncesi yüzey tamamen kuru olmalıdır.
- ❖ Yetersiz yüzey hazırlığı glaze tutunmasını ve uzun dönem yüzey stabilitesini olumsuz etkiler.

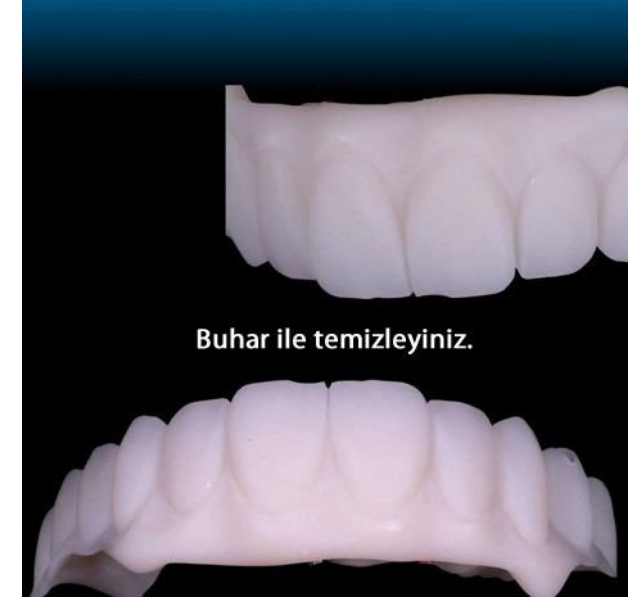


2. PERİOST BÖLGESİ KARAKTERİZASYONU

(Aşama 2 – Periostal Yüzey)

Bu aşamada gingival dokunun derinlik ve vasküler etkisi oluşturulur.

- Ivory, Rutilite A ve Ruby Red tonları kullanılır.
- Renkler ince katmanlar halinde, düşük pigment yoğunluğu ile uygulanır.
- Fırça darbeleri yumuşak ve kontrollü olmalı, sert sınırlar oluşturulmamalıdır.
- ♣ Amaç: Periostal dokunun doğal vaskülarizasyonunu simüle etmektir.

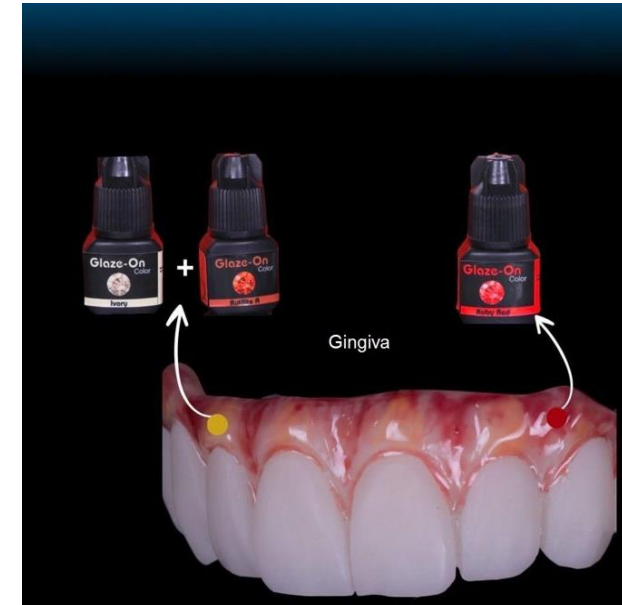

3. SERBEST GİNGİVA VE ALVEOLAR MUKOZA

(Aşama 3 – Free Gingiva & Alveolar Mucosa)

Serbest Gingiva:

- White
- Rhodonite Pink
- Amber Yellow

Alveolar Mukoza:

- Ruby Red
- Amethyst Lavender

Uygulama prensibi:

- Gingival ve mukozal alanlar ayrı anatomik bölgeler olarak değerlendirilir.
- Renkler üst üste yığılmadan, transparan geçişlerle uygulanır.
- Doğal doku varyasyonları korunur.

❖ Aşırı renk kullanımı yapay ve opak bir görüntüye neden olur.



4. DIŞ YÜZEYİ KARAKTERİZASYONU

(Aşama 4 – Diş Yüzeyi Karakterizasyonu)

Mamelo ve İnsizal Halo:

- White
- Ivory

İnsizal Bölge:

- Amethyst Lavender
- Opal Blue

Servikal Bölge:

- Rutilite A
- Ivory

Uygulama:


- Diş yüzeylerinde derinlik ve saydamlık hedeflenir.
- Mamelo ve halo efektleri ince katman tekniği ile oluşturulur.
- Servikal bölgede gingiva–diş geçişi doğal şekilde yumuşatılır.



5. SON GLAZE UYGULAMASI

(Aşama 5 – Final Glaze)

- Glaze On Clear, tüm yüzeye ince ve homojen tabaka halinde uygulanır.
- Kabarcık ve birikme oluşmamasına dikkat edilir.
- Amaç: Yüzey kapatma, parlaklık ve uzun dönem stabilite.

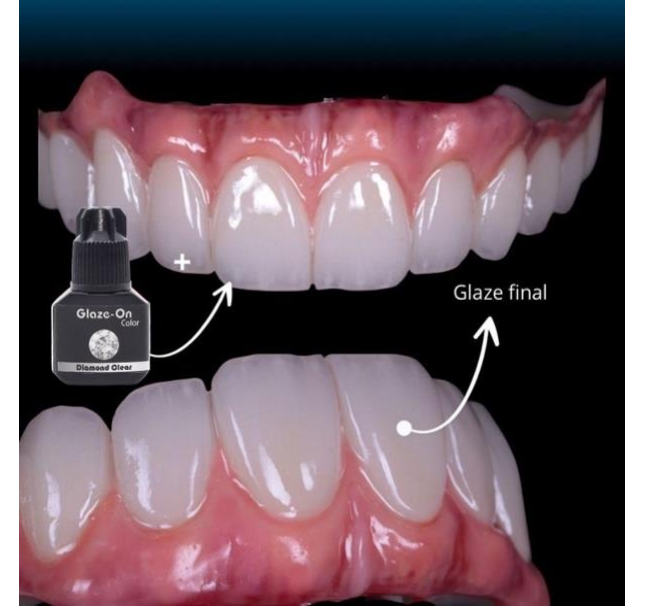


6. POLİMERİZASYON

- LED (365–405 nm): 60–90 saniye
 - UV cihaz: 2–4 dakika
- ❖ Işık kaynağı yüzeye mümkün olduğunca yakın konumlandırılmalıdır.

7. SON KONTROL

- Yüzey pürüzsüz, parlak ve homojen olmalıdır.
- Yapışkan tabaka varsa alkol ile hafifçe temizlenebilir.
- Ek mekanik polisaj gerekmez.

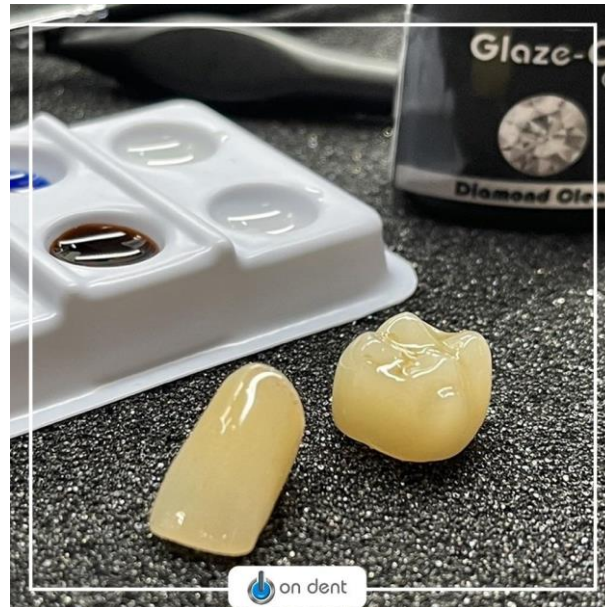

ÖNEMLİ PROFESYONEL UYARILAR

- ◆ Bu ürün yalnızca dental laboratuvar ortamında, diş teknisyenleri ve diş hekimleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- ◆ Ağız içinde doğrudan kullanım için uygun değildir ve hasta ile temas etmez.
- ◆ Daima eldiven, yüz maskesi ve gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanınız.
- ◆ Özellikle polimerize olmamış ürünün deri ile temasından kaçının. Temas halinde derhal bir spanç veya pamuk pelet ile uzaklaştırın ve su ile yıkayın.
- ◆ Göz ile teması halinde bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- ◆ Yüksek derecede, yanıcı sıvı ve buhardır. Ateş kaynağından uzak tutun ve açık ateş yakınında kullanmayın.
- ◆ Uçucudur. Solunum yollarını tahriş edebilir. İyi havalandırılmış ortamda kullanınız ve kullandıktan sonra kapağını hemen kapatınız.
- ◆ Yüksek basınçlı ortamlarda kullanılması önerilmez.
- ◆ Rezin yüzeyi kaplayan oksijen inhibisyon tabakası GLAZE ON kullanımı öncesi kaldırılmalıdır. Aksi takdirde tam polimerize olmasını engelleyebilir.
- ◆ Materyal uçucu solvent içerdiği için GLAZE ON'u uygulamadan önce tek kullanımlık godeye sıkın.
- ◆ Kullandıktan sonra kapağını hemen kapatın.
- ◆ Yerel yönetmeliklere göre tüm atıkları bertaraf edin.
- ◆ Ürün ender olarak alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu gibi durumlarda ürünü kullanmayı bırakın ve bir uzamana danışın.